

PORADNIK

DLA OSÓB Z NEFROSTOMIĄ



INNOWACYJNE PRODUKTY UROLOGICZNE

SPIS TREŚCI

Anatomia i fizjologia układu moczowego	4
Co to jest nefrostomia?	6
Przyczyny i wskazania do wykonania nefrostomii	7
Na czym polega zabieg nefrostomii?	10
Na jaki czas wykonuje się nefrostomię?	11
Ryzyko powikłań po wykonaniu nefrostomii	12
Pielęgnacja nefrostomii	13
Zalecenia dotyczące diety dla osób z nefrostomią	14
O co najczęściej pytają pacjenci z nefrostomią?	16
Jak otrzymać refundowane zaopatrzenie do nefrostomii?	20
Kody uprawnień dodatkowych	22
Produkty do zbiórki moczu – zaopatrzenie do nefrostomii	28
Worki do zbiórki moczu	32
Akcesoria mocujące worki do zbiórki moczu	42
Produkty do zbiórki moczu – inne zastosowania	48
O firmie	50
Asortyment produktów do zbiórki moczu	52
Wykaz wybranych refundowanych produktów urologicznych	54

ANATOMIA I FIZJOLOGIA UKŁADU MOCZOWEGO

Głównym zadaniem układu moczowego człowieka jest oczyszczenie organizmu ze zbędnych produktów przemiany materii poprzez ich wydalanie w postaci moczu, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej ilości płynów ustrojowych w równowadze. Układ pokarmowy człowieka składa się z narządów, których główną rolą jest pobieranie i wchłanianie składników odżywczych pochodzących z pokarmów i wody oraz usuwanie niestrawionych resztek pokarmowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.


Układ moczowy składa się z nerek, moczowodów, pęcherza moczowego oraz cewki moczowej.

Nerki mają kształt fasoli oraz wielkość około 12 cm każda i usytuowane są na tylnej ścianie jamy brzusznej po obu stronach kręgosłupa. O istotnym znaczeniu nerek dla organizmu człowieka świadczy duża rezerwa czynnościowa – aby wystąpiły poważne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności nerek, zniszczeniu musi ulec aż 75% ich prawidłowego miąższu. Oznacza to, że jedna prawidłowo pracująca nerka jest wystarczająca dla normalnego funkcjonowania układu moczowego. Moczowody są wąskimi rurkami o umięśnionej ścianie, którymi mocz spływa z miedniczek nerkowych do znajdującego się w dole brzucha pęcherza moczowego, będącego zbiornikiem na mocz. Wypełnienie pęcherza powoduje potrzebę oddania moczu. Aby mogło dojść do mikcji (oddania moczu), pęcherz moczowy kurczy się i mocz odpływa na zewnątrz przez cewkę moczową.

Krew doprowadzana jest do każdej z nerek poprzez tętnicę nerkową, będącą bezpośrednim odgałęzieniem najważniejszej tętnicy organizmu człowieka – aorty. Tętnica, wraz z wnikaniem do nerki, rozgałęzia się na


coraz mniejsze tętniczki, końcowo na naczynia krwionośne. Każda nerka zbudowana jest z około miliona mikroskopijnych jednostek, zwanych nefronami. Każdy z nich składa się dodatkowo z kłębuszka nerkowego, którego głównym elementem są naczynia krwionośne, służące jako filtr dla przepływającej przez nie krwi. W ten sposób z ustroju usuwane są zbędne produkty przemiany materii oraz nadmiar wody, a w przypadku słabego nawodnienia organizmu woda jest zatrzymywana, aby zapobiec odwodnieniu organizmu. Dodatkowo dzięki filtracji następującej w nerkach, możliwe jest utrzymanie w organizmie prawidłowych stężeń elektrolitów, takich jak sód i potas oraz wapnia, magnezu, fosforu i innych kwasów i zasad. W ten sposób przefiltrowana krew ulega ostatecznej przemianie w mocz, który opuszczając miedniczki nerkowe odpływa moczowodami do pęcherza moczowego.

WYŁONIE NEFROSTOMII

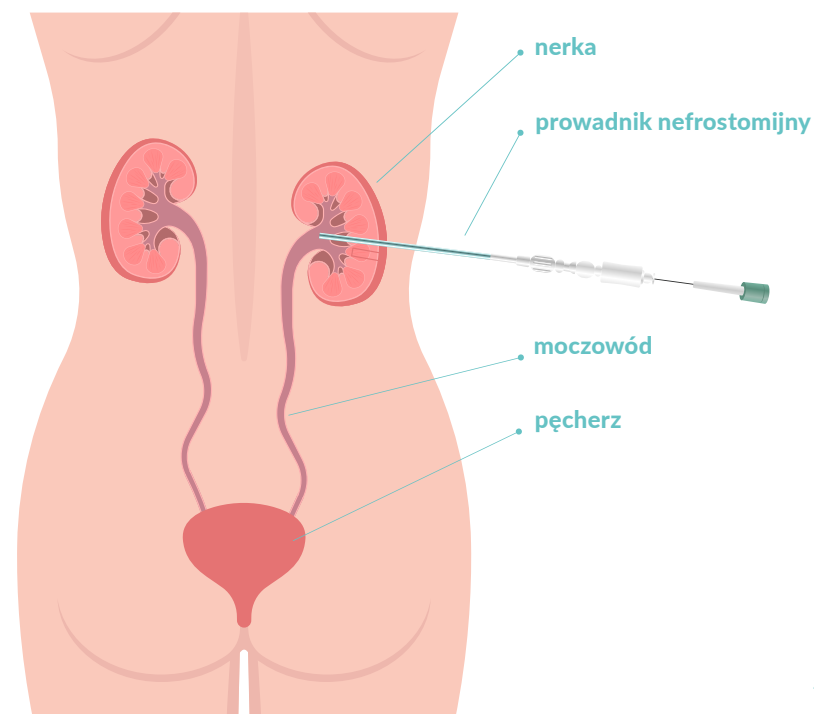

CO TO JEST NEFROSTOMIA?

Wykonanie nefrostomii, inaczej zwanej przetoką nerkowo-skórną, jest zabiegiem wykonywanym ze względów leczniczych, najczęściej w celu odprowadzenia zalegającego moczu w nerce lub w celu diagnostycznym, np. w przypadku wodonercza o niejasnej etiologii. Nefrostomię wykonuje się drogą operacyjną lub przy użyciu zestawu punkcyjnego poprzez nakłucie nerki przez powłokę skórną i założenie cewnika.

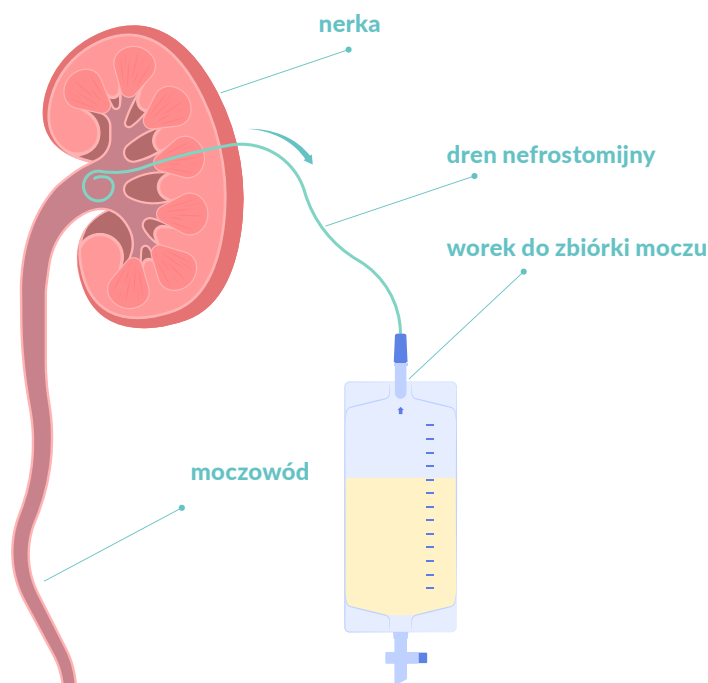

PRZYCZYNY I WSKAZANIA DO WYKONANIA NEFROSTOMII

Nefrostomię wykonuje się z wielu przyczyn, a najważniejszą z nich jest zapewnienie drożności i swobodnego odpływu moczu z nerek w przypadku, gdy doszło do zablokowania moczowodu. Wskazania:

- **nowotwór naciskający moczowód, m.in. nowotwór pęcherza moczowego, nowotwór szyjki macicy, nowotwór jajnika, nowotwór prostaty, nowotwór jelita grubego i odbytnicy:**

Większość nowotworów wraz z upływem czasu ulega powiększeniu, czasami dając przerzuty w odległe miejsca organizmu. Te zlokalizowane w jamie brzusznej lub miednicy mniejszej, teoretycznie nie mające związku z układem moczowym, np. nowotwór jajnika czy jelita grubego, także mogą wywierać negatywny wpływ na sposób odprowadzania moczu z nerki. Gdy zlokalizowane są w pobliżu moczowodów, mogą uciskać je od zewnątrz, powodując niedrożność oraz utrudniając swobodny odpływ moczu.

- **kamień w miedniczce nerkowej lub moczowodzie:**

Kamień jest stwardniałą, zbitą masą, która może tworzyć się w nerkach, pęcherzyku żółciowym lub pęcherzu moczowym. Kamienie najczęściej powstają, gdy zawarte w moczu minerały lub sole kwasów ulegają krystalizacji. Większość powstających kamieni jest wydalana z organizmu podczas oddawania moczu, czasem jednak mogą utknąć w moczowodzie, zablokować normalny przepływ moczu i spowodować jego zastój w nerce oraz wystąpienie objawów chorobowych. Niektóre z nich, ze względu na zbyt duży rozmiar, nie są w stanie przejść przez moczowód i zostać samoistnie wydalone. W takim przypadku może być konieczna interwencja chirurgiczna – w celu usunięcia zalegających kamieni i zapewnienia swobodnego odpływu moczu do pęcherza moczowego.

- **pozapalne lub pogruchłe zwężenie moczowodu:**

Zarówno stan zapalny i proces gojenia, jak i zmiany pozostałe po przebyciu gruźlicy, odpowiedzialne są za nadmierne wytwarzanie tkanki łącznej. W niektórych przypadkach może to spowodować zupełne zarośnięcie i zamknięcie światła moczowodu, prowadząc do zablokowania drogi odpływu moczu.

- **zwężenia moczowodów po napromienianiu narządów miednicy mniejszej:**

W związku z uszkodzeniem przez promienie jonizujące ścian naczyń krwionośnych, w początkowym okresie radioterapii w moczowodach dochodzi do przekrwienia i obrzęku otaczających go tkanek. U ponad połowy pacjentów następuje wówczas ucisk moczowodów i zwężenie ich światła, czego wynikiem jest wystąpienie przejściowej niedrożności moczowodów oraz powstanie zastoju moczu. Po zakończeniu radioterapii lub czasem jeszcze w jej trakcie może dojść do zarostowego zapalenia naczyń, w tym zastąpienia nabłonka naczyń tkanką włóknistą. Proces włóknienia obejmuje również tkanki okołomoczowodowe. Wynikiem opisanych procesów może być częściowa lub całkowita niedrożność moczowodów, której mogą towarzyszyć przetoki.


- **pourazowe i pooperacyjne uszkodzenie moczowodów:**

Urazy układu moczowego najczęściej występują w wyniku wypadków komunikacyjnych, kopnięcia lub uderzenia tępym narzędziem w okolicę lędźwiową, zadania rany klutej ostrym narzędziem lub rany postrzałowej. Czasami uszkodzenie moczowodów następuje w wyniku urazu jatrogennego, tj. niezamierzonego zachowania się pracownika placówki leczniczej, głównie lekarza stawiającego mylną diagnozę lub w wyniku błędu podczas operacji.

- **nefrostomię wykonuje się także w celu:**

- profilaktycznym, po resekcji guzów miedniczki nerkowej;
- zapewnienia dostępu środków leczniczych bezpośrednio do układu wydalniczego – najczęściej antybiotyków;
- diagnostycznym, np. w przypadku wodonercza o niejasnej etiologii, drenażu torbieli lub ropnia nerki.

Wodonercze występuje w sytuacji, gdy nerka wytwarza mocz w prawidłowej ilości, ale na drodze jego odpływu znajduje się jakaś przeszkoda, np. guz, kamień moczowy lub masa uciskająca drogi moczowe z zewnątrz. Wówczas mocz zalega w nerce, stopniowo niszczy jej strukturę i upośledza funkcje nerki. W celu zachowania prawidłowego funkcjonowania nerki należy szybko usunąć przeszkodę w odpływie moczu, bądź umożliwić odpływ inną drogą. To drugie rozwiązanie zapewnia nefrostomia przezskórna.

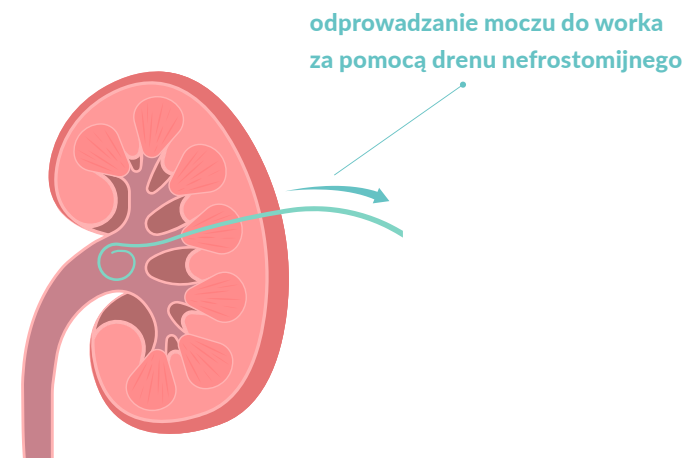

NA CZYM POLEGA ZABIEG NEFROSTOMII?

Zabieg nefrostomii wykonywany jest przez lekarza urologa w sterylnych warunkach szpitalnych. Lekarz ocenia strukturę anatomiczną nerki przy użyciu technik obrazowych takich jak RTG lub USG. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, podczas którego pacjent leży na boku lub na brzuchu tak, aby odstąpić nakłuwany narząd. Urolog pod kontrolą USG nakłuwa układ kielichowo-miedniczkowy nerki specjalistyczną igłą (miąższ nerki pozostaje nienakłuty) i wprowadza do niego dren nefrostomijny, który jest specjalnie wyprofilowany – jego koniec nerkowy ulega zawinięciu i przypomina świński ogon. Taka konstrukcja cewnika ma za zadanie utrzymanie drenu we wnętrzu układu kielichowo-miedniczkowego nerki przez dłuższy czas i chroni przed jego samoistnym wysunięciem. Końcówka drenu zaopatrzona jest w liczne otwory, co ułatwia odprowadzanie moczu z nerki. Dren nefrostomijny zostaje wszyty w miejscu jego wyjścia na skórze w celu zwiększenia stabilności. Będzie on wychodził z boku ciała i będzie podłączony do specjalnego worka do zbiórki moczu. Worek noszony jest zazwyczaj pod ubraniem, przyczepiany do uda lub do łydki pacjenta.

NA JAKI CZAS WYKONUJE SIĘ NEFROSTOMIĘ?

Czas, na jaki wykonuje się nefrostomię, jest kwestią indywidualną. W przypadku, gdy na skutek leczenia nowotworu zanikają zatory w moczowodach, możliwe będzie usunięcie nefrostomii. W niektórych przypadkach możliwe będzie założenie specjalnych stentów, które będą obchodzić zatory w moczowodzie. Jeżeli zabieg założenia stentu się uda, możliwe będzie usunięcie nefrostomii.

U osób, u których leczenie nowotworu lub założenie stentu nie jest możliwe, nefrostomia zazwyczaj pozostaje na stałe. Każdy przypadek jest indywidualny i powyższe kwestie są dokładnie omawiane z lekarzem.



RYZIKO POWIKŁAŃ PO WYKONANIU NEFROSTOMII

Ryzyko wystąpienia powikłań na skutek wykonania zabiegu nefrostomii jest stosunkowo niskie. Czasami mogą wystąpić infekcje, krwawienia lub wyciek moczu z nerki. Twój stan zdrowia będzie dokładnie monitorowany w szpitalu, aby natychmiast zapobiec wszelkim możliwym komplikacjom.

PIELĘGNACJA NEFROSTOMII

Po powrocie do domu nefrostomia nie powinna być przeszkodą w swobodnym poruszaniu się i prowadzeniu normalnego trybu życia. W początkowym okresie po zabiegu wykonywanie niektórych codziennych czynności (schylanie, wchodzenie po schodach itp.) może powodować dyskomfort. Znalezienie wygodnej pozycji do spania również może stanowić pewien problem. Z czasem jednak wszystkie niedogodności związane z nefrostomią powinny ustąpić.

Lęk związany z życiem z nefrostomią jest naturalny i może zostać łatwo zażegnany dzięki wsparciu i pomocy rodziny lub przyjaciół. Ważne przy tym jest przestrzeganie prostych reguł:

- worki do zbiórki moczu zmieniaj tak często, jak zalecił to lekarz lub pielęgniarka,
- zawsze myj ręce przed i po zmianie worka lub opatrunku,
- niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem, jeśli mocz zawiera krew, ma mętną konsystencję lub ostry zapach, a także wtedy, kiedy odczuwasz ból związany z wydalaniem moczu. Mogą być to symptomy infekcji dróg moczowych, która wymagać będzie zastosowania antybiotyków,
- pij dużo płynów, aby zminimalizować możliwość infekcji – dziennie powinny być to przynajmniej 2 litry, najlepiej wody niegazowanej,
- skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli odczuwasz ból skóry wokół drenu, jeśli skóra jest zaczerwieniona lub obrzęknięta. Mogą to być objawy infekcji wymagającej natychmiastowej interwencji lekarskiej,
- niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką, jeżeli z ciała wypadnie dren lub przestanie on odprowadzać mocz, a także w przypadku samoistnego uwolnienia szwu mocującego dren we właściwym położeniu.

Jeśli masz podejrzenia, że z Twoją nefrostomią dzieje się coś złego, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką!

ZALECENIA DOTYCZĄCE DIETY DLA OSÓB Z NEFROSTOMIĄ

Nie ma ścisłych wytycznych co do rodzaju diety, jaka powinna być stosowana u pacjentów z nefrostomią. Dieta powinna być lekkostrawna. Aby zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu oraz ułatwić pozbywanie się zbędnych produktów przemiany materii należy wypijać duże ilości płynów – minimum 2 litry dziennie. Aby nie obciążać układu moczowego nie powinno się spożywać alkoholu, kawy, mleka, owoców cytrusowych oraz ostrych przypraw. Należy starać się zapobiegać chorobom układu moczowego poprzez spożywanie żurawiny, która ma działanie protekcyjne na układ moczowy.



O CO NAJCZĘŚCIEJ PYTAJĄ PACJENCI Z NEFROSTOMIĄ?



Przez jaki czas będę mieć nefrostomię?

Czas utrzymania nefrostomii jest uzależniony od przyczyny jej wytworzenia – gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową może być utrzymana na stałe, w innych przypadkach do czasu usunięcia kamienia, zwężenia czy rekonstrukcji moczowodu.

Jak często wymieniany jest cewnik nefrostomijny?

Częstotliwość wymiany cewnika powinna być określona przez lekarza. Zazwyczaj cewniki silikonowe wymieniamy co 1 – 3 miesiące, a lateksowe co 1 – 3 tygodnie.



Co zrobić w przypadku zauważenia zmniejszonej ilości moczu w worku do zbiórki moczu?

W tym przypadku mógł wysunąć się dren nefrostomijny lub wypaść cewnik. Należy pilnie zgłosić się do lekarza. Istnieje wtedy możliwość założenia nowego drenu do nerki poprzez istniejący już kanał, a opóźnienie może spowodować zamknięcie się kanału w nerce i konieczność ponownego nakłucia nerki lub ponowienia całego zabiegu.

W jaki sposób cewnik jest wprowadzony do nerki?

Cewnik wprowadzany jest bezpośrednio do nerki. W zależności od typu zastosowanego cewnika przyszywa się go do skóry lub stosuje się cewnik z balonikiem umieszczanym wewnątrz ciała pacjenta i wypełnianym według zaleceń producenta cewnika, dzięki czemu przyszywanie cewnika do skóry nie jest konieczne.



Jak mam dbać o moją nefrostomię?

Zaleca się codzienną pielęgnację i higienę skóry wokół nefrostomii. Worki do zbiórki moczu powinno wymieniać się codziennie.

Jaką ilość płynów należy spożywać w ciągu doby, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie i właściwe nawodnienie organizmu?

Zaleca się wypijanie ok. 2 litrów płynów na dobę. Należy kontrolować ilość moczu spływającego do worka oraz ostrożnie obchodzić się z drenem, aby uniknąć jego wyrwania.






Czy z nefrostomią mogę pracować zawodowo?

Oczywiście, że tak. Komfort życia z nefrostomią jest dobry, należy jednak przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarских oraz zgłaszać się w wyznaczonych terminach na wymianę cewnika nefrostomijnego.

Kiedy przysługuje mi refundacja worków do zbiórki moczu?

Refundacja worków do zbiórki moczu przysługuje w ramach limitów ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia ubezpieczonym pacjentom:

- **z nefrostomią** (kod zaopatrzenia P.098): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do dobowej zbiórki moczu, akcesoria mocujące;
- **z urostomią** (kod zaopatrzenia P.099U): worki urostomijne, worki do zbiórki moczu na nogę, worki do dobowej zbiórki moczu, akcesoria mocujące;
- **wymagającym cewnikowania pęcherza moczowego, z chorobami wymagającymi stosowania cewników zewnętrznych oraz nadpęcherzowego odprowadzania moczu** (kod zaopatrzenia P.097): worki do zbiórki moczu na nogę, worki do dobowej zbiórki moczu.

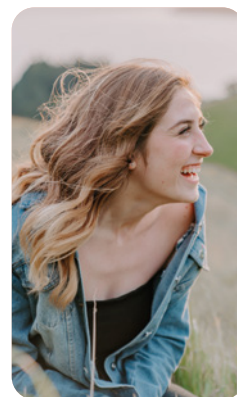

Czy refundacja worków do zbiórki moczu jest całkowita, czy będę ponosić jakieś koszty związane z ich odbieraniem?

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii są refundowane w 100% w ramach limitu ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia. Dla ubezpieczonych pacjentów z nefrostomią limit na 1 miesiąc zaopatrzenia wynosi 120 zł. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania refundacji opisano w rozdziale „Jak otrzymać refundowane zaopatrzenie do nefrostomii?”



JAK OTRZYMAĆ REFUNDOWANE ZAOPATRZENIE NEFROSTOMII?



Produkty do zaopatrzenia nefrostomii są refundowane w 100% przez Narodowy Fundusz Zdrowia do wysokości limitu:

- Dla pacjentów z **nefrostomią** limit na 1-mc zaopatrzenia wynosi **120 zł (10 zł/szt. do 12 szt./miesiąc)**. W limicie refundowane są wyroby medyczne: worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk lub inny sprzęt urologiczny (np. paski mocujące). Na zleceniu lekarz powinien wpisać **KOD ZAOPATRZENIA: P.098 – worki do zbiórki moczu w przypadku nefrostomii**.
- Dla pacjentów nieposiadających nefrostomii, ale korzystających z worków do zbiórki moczu, np. w związku z **cewnikowaniem** – limit na 1-mc zaopatrzenia wynosi **78 zł (6,50 zł/szt. do 12 szt./miesiąc)**. W limicie refundowane są wyroby medyczne: worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk. Na zleceniu lekarz powinien wpisać **KOD ZAOPATRZENIA: P.097 – worki do zbiórki moczu**.

Pacjenci mogą otrzymać zaopatrzenie jednorazowo na okres od 1 do 6 miesięcy.

KROK PIERWSZY: OTRZYMANIE ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

„Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” ubezpieczony otrzyma od odpowiedniego lekarza na okres od 1 do 12 miesięcy. Jeśli zlecenie otrzymujesz pierwszy raz (jesteś pacjentem po zabiegu wykonania nefrostomii) – zlecenie otrzymasz przy wypisie ze szpitala.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne może być wystawione przez:

Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej, neurologii lub neurologii dziecięcej, nefrologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej. Po kolejnym zleceniu udaj się do przychodni lub poradni, w której przyjmują uprawnieni lekarz POZ, chirurg, onkolog lub urolog. Ważne, aby przychodnia lub poradnia miała podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE ZLECENIA

Od 1 kwietnia 2020 r. uprawnienia pacjentów do refundacji wyrobów medycznych są weryfikowane i potwierdzane za pośrednictwem serwisów internetowych i usług informatycznych NFZ już na etapie wypisywania zaopatrzenia przez osobę uprawnioną. Innymi słowy, lekarz wystawiając zlecenie na sprzęt nefrostomijny sam dokona jego potwierdzenia w sposób elektroniczny łącząc się ze specjalną usługą NFZ. Oznacza to, że **zlecenie będzie nadawać się do realizacji od razu po jego wystawieniu i przejściu pozytywnej weryfikacji w systemie informatycznym NFZ – bez konieczności jego osobistego potwierdzenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ**.

KROK DRUGI: REALIZACJA ZLECENIA – ODBIÓR PRODUKTÓW LARENA DO ZAOPATRZENIA NEFROSTOMII

Po odbiorze zlecenia lekarskiego z pozytywnym wynikiem weryfikacji, udaj się do sklepu medycznego posiadającego umowę na wydawanie sprzętu urologicznego w ramach refundacji NFZ.

Sprzęt możesz odebrać osobiście lub poprzez wybraną osobę:

- 1. w Sklepie Medycznym Sturomedica przy ul. Dzikiej 15 w Warszawie**
– sklep czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, telefon 530-612-783 lub 22 468-13-94;
- 2. w innym Sklepie Medycznym, który ma podpisaną umowę refundacyjną z NFZ;**
- 3. pocztą kurierską, bezpośrednio do domu, bez kosztów przesyłki. Zamówienie możesz złożyć poprzez:**
 - kontakt telefoniczny (pod numerami podanymi powyżej) i przekazanie numeru identyfikacyjnego zlecenia. Podczas rozmowy ustalone zostaną rodzaj i ilość potrzebnego zaopatrzenia;
 - wysłanie zlecenia na wyroby medyczne listem poleconym na adres:

**Sklep Medyczny Sturomedica
ul. Dziką 15, 00-172 Warszawa**

dołączając na osobnej kartce następujące informacje: rodzaj, nazwę sprzętu medycznego jaki chcesz otrzymać (numery katalogowe – jeśli je znasz), ilości – w ramach przysługującego limitu, swój numer telefonu dla kuriera (ułatwi to kontakt z Tobą) i adres dostawy.

Produkty do zaopatrzenia nefrostomii dostarczymy na Twój adres **bezpłatnie pocztą kurierską!**

**Zalecamy uzyskanie zleceń i ich realizację
na początku miesiąca!**

Przed realizacją zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy sprawdzić jego prawidłowość:

- czy został wygenerowany kod kreskowy z numerem identyfikacyjnym w górnym prawym rogu zlecenia;
- czy na trzeciej stronie zlecenia znajduje się informacja o jego pozytywnej weryfikacji;
- czy został wpisany prawidłowy kod zaopatrzenia;
- czy w polu „liczba sztuk” została wpisana prawidłowa liczba sztuk (tj. 12 na miesiąc lub w przypadku pacjentów z kodem uprawnień dodatkowych 47ZN, 47ZND lub 47DN – odpowiednio większa ilość).



KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH

Kto może otrzymać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Znaczny stopień niepełnosprawności, umożliwiający korzystanie z kodu dodatkowych uprawnień **47ZN**, orzeka się wobec osób **powyżej 16 roku życia**, u których, wskutek naruszenia sprawności organizmu, występują łącznie dwie przesłanki:

- **ograniczenie w wykonywaniu zatrudnienia, tj. niezdolność do pracy lub zdolność do pracy w warunkach chronionych;**
- **konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.**

Wszystkim pacjentom **poniżej 16 roku życia** przysługuje możliwość korzystania z analogicznego kodu uprawnień dodatkowych **47ZND**, jeżeli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- **konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji**
- **konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.**

Skąd uzyskać wniosek o wydanie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Wniosek można uzyskać w siedzibie miejscowo właściwego miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W zależności od organizacji pracy przyjętej w danym zespole, zazwyczaj możliwe jest pobranie wniosku z jego strony internetowej.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

- **Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia** – druk zaświadczenia można otrzymać w siedzibie właściwego miejscowo zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub pobrać go ze strony internetowej zespołu. Zaświadczenie musi być wypełnione przez lekarza leczącego osobę zainteresowaną. Zaświadczenie jest ważne przez miesiąc od daty jego wydania;
- **Kopię dokumentacji medycznej** – są to np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne;
- **Inne dokumenty**, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności – jeśli takie posiadasz.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć:

- osoba zainteresowana;
- przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (rodzic, kurator oraz opiekun osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej);
- kierownik ośrodka pomocy społecznej – jeśli zgodzi się na to osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy.

Kto przyjmuje i rozpatruje wniosek?

Przyjęcie oraz rozpatrzenie wniosku o orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności odbywa się w postępowaniu dwuinstancyjnym przed uprawnionymi do tego organami.

Przyjęciem oraz rozpatrzeniem wniosku w pierwszej instancji zajmują się miejskie/powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Odwołaniem i ponownym rozpatrzeniem wniosku drugiej instancji zajmuje się właściwy miejscowo wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Odwołanie można złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem powiatowego zespołu, który orzekał w pierwszej instancji.

Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku?

Co do zasady, wniosek powinien być rozpatrzony w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych, rozpatrzenie wniosku może zająć do 2 miesięcy licząc od dnia jego złożenia.

Jak uzyskać zwiększone zaopatrzenie w wyroby medyczne z orzeczeniem 47ZN / 47ZND?

Osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności posiada prawo do uzyskania wyrobów medycznych w ramach refundacji NFZ według wskazań medycznych w zwiększonej ilości oraz bez uwzględnienia okresów użytkowania. Aby otrzymać zwiększone zaopatrzenie, osoba zainteresowana powinna:

1. **Udać się po nowe zlecenie** na zaopatrzenie w wyroby medyczne do osoby uprawnionej do jego wystawienia – w przypadku zlecenia dla **nefrostomii (P.098), urostomii (P.099.U) lub chorób wymagających cewnikowania pęcherza moczowego (P.097)** będzie to lekarz POZ, chirurg, onkolog lub urolog.

Lekarz powinien każdorazowo wypełnić część **I.BA. UPRAWNIENIA** znajdującą się na pierwszej stronie zlecenia. Do wypełnienia poniższej części potrzebne będzie orzeczenie pacjenta o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przykład poprawnie wypełnionej części **I.BA.** :

	PACJENT I.BA.2 Rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe lub wpisanie litery „C”	I.BA.3 Numer dokumentu z pkt I.BA.2 ⁶⁾	I.BA.4 Data ważności dokumentu z pkt 1.BA.2 ⁶⁾	I.BA.5 Data wystawienia dokumentu z pkt I.BA.2 ⁶⁾	I.BA.6 Numer prawa wykonywania zawodu osoby uprawnionej, która wystawiła dokument potwierdzający uprawnienie dodatkowe, jeżeli dotyczy ⁶⁾
I.BA. Kod tytułu uprawnienia dodatkowego ⁶⁾ np. 47ZN	np. 8 - Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (od 16 roku życia) albo inne traktowane równorzędnie (w tym wyroki sądowe i legitymacje)	np. WN-I 1234-567/89	np. 01.01.2027	np. 01.01.2022	

O ilości miesięcznego zaopatrzenia decyduje każdorazowo uprawniony lekarz wpisując w zależności od wskazań medycznych i potrzeb pacjenta odpowiednią liczbę sztuk w polu **I.C.1.7:**

- **24 sztuk na miesiąc**
– jeżeli pacjent potrzebuje **2-krotnie więcej sprzętu** dla jednej przetoki
- **36 sztuk na miesiąc**
– jeżeli pacjent potrzebuje **3-krotnie więcej sprzętu** dla jednej przetoki
- **48 sztuk na miesiąc**
– jeżeli pacjent potrzebuje **4-krotnie więcej sprzętu** dla jednej przetoki

2. **Udać się do sklepu medycznego**, aby otrzymać zaopatrzenie. Zlecenie możesz zrealizować także drogą wysyłkową – w tym celu wyślij zlecenie lub jego nr (poprzez sms, email lub telefonicznie) do sklepu medycznego posiadającego potrzebny Ci sprzęt oraz umowę refundacyjną z NFZ. Sklep medyczny wyśle zaopatrzenie na podany przez Ciebie adres.



PRODUKTY DO ZBIÓRKI MOCZU – ZAOPATRZENIE DO NEFROSTOMII

Worki do zbiórki moczu oraz akcesoria moczujące **Larena** zostały zaprojektowane z myślą o ich użytkownikach. Zapewniają pacjentowi maksymalną wygodę i bezpieczeństwo. Produkty **Larena** łączą wysoką funkcjonalność, nowoczesny wygląd z solidnością wykonania.

W procesie tworzenia worków do zbiórki moczu **Larena** zostały wzięte pod uwagę wszystkie praktyczne aspekty związane z korzystaniem z worka, zarówno w szpitalu jak i poza nim. Konstrukcja i sposób wykonania worków do zbiórki moczu **Larena** uwzględnia wiele przydatnych udogodnień i zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

Worki do zbiórki moczu **Larena** dostępne są w różnych wariantach oraz rozmiarach, aby jak najlepiej zaspokoić indywidualne potrzeby pacjenta. Produkty **Larena** stanowią najlepszy wybór dla osób poszukujących produktów innowacyjnych o najwyższej jakości.

Najważniejsze cechy worków do zbiórki moczu **Larena** to: zawór antyzwrotny, wygodny zawór odpływowy, miękka wyściółka fizelinowa, gładki, antyskrętny dren, pewny i bezpieczny łącznik w kształcie stożka, praktyczne sposoby zamocowania worka do ciała.

Pojedyncze opakowanie

Wszystkie worki **Larena** pakowane są pojedynczo w osobne opakowania posiadające linie perforacyjne, które ułatwiają otwarcie opakowania. Osobne opakowania umożliwiają higieniczne przechowywanie produktu oraz gwarantują, że produkt nie był wcześniej używany.



Zawór antyzwrotny

Wszystkie worki **Larena** posiadają zawór zapobiegający cofaniu się moczu – niezależnie od pozycji ciała i worka.



Wygodny i bezpieczny zawór odpływowy

Worki **Larena** o pojemności 350 ml, 500 ml oraz 750 ml posiadają innowacyjny, wygodny i łatwy w obsłudze zawór odpływowy Lever-tap, który może być obsługiwany jedną ręką nawet przez osoby o niepełnej sprawności rąk.



Wyjątkowo miękka wyściółka flizelinowa

Worki **Larena** do mocowania na nogę posiadają miękką wyściółkę flizelinową, która chroni skórę przed odparzeniami.



Gładki dren – bezpieczeństwo i przyjemność

Wszystkie worki **Larena** posiadają gładki dren o dużej średnicy wewnętrznej, nieulegający zagięciom, zapewniający ciągłą drożność i niezaleganie nawet najdrobniejszych kropli moczu.



Gładki dren – wygoda i indywidualne dopasowanie

Dren w workach **Larena** do mocowania na nogę można docinać na dowolną długość – indywidualnie dopasowaną do potrzeb pacjenta (odróżnia to dreny gładkie od karbowanych, które można docinać jedynie skokowo w odstępach co 5–6 cm).



Łącznik w kształcie stożka

Wszystkie worki **Larena** posiadają łącznik w kształcie stożka, umożliwiający pewne i wygodne podłączenie worka do cewnika.



Łatwe podłączenie do dodatkowego worka do zbiórki moczu

Worki **Larena** do mocowania na nogę mogą zostać podłączone do dodatkowego worka do zbiórki nocnej moczu – bez konieczności zdejmowania worka z nogi. Po zamocowaniu dodatkowego worka do dobowej zbiórki moczu, zawór odpływowy należy otworzyć w dół.



Sposoby zamocowania worków Larena:

Worki **Larena** mogą być mocowane na udzie oraz zewnętrznej i wewnętrznej stronie łydki.



WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU

Worek Larena do zbiórki moczu mocowany na nogę pojemność 350 ml, 500 ml, 750 ml

Worek do zbiórki moczu mocowany na nogę posiada: zawór anty-zwrotny, miękką wyściółkę fizelinową, unikatowy zawór odpływowy Lever-tap, gładki dren o dużej średnicy z możliwością docięcia oraz otwory na mocowanie pasków mocujących do nogi.

Zawór odpływowy Lever-tap

Uniwersalny łącznik w kształcie stożka umożliwia proste podłączenie worka do cewnika wewnętrznego (urologicznego), cewnika zewnętrznego lub worka urostomijnego

Zawór anty-zwrotny zapobiega cofaniu się moczu, co jest bardzo ważne w profilaktyce infekcji

Otwory na mocowanie pasków mocujących do nogi

Skala nadrukowana na zewnątrz worka ułatwia odczyt ilości zebranego moczu

Dyskretny, miękki i elastyczny dren pozwala na pełną swobodę przy poruszaniu się z workiem oraz umiejscowienie go poniżej poziomu pęcherza moczowego użytkownika. Przewód ułatwia odpływ moczu do worka, bez zalegania kropli moczu. Średnica oraz grubość drenu eliminuje możliwość powstawania niedrożności czy zagięcia, co zapewnia bezpieczeństwo i swobodę także podczas snu – bez ryzyka skręcenia drenu i zatkania odpływu moczu. Dren można dociąć przed założeniem łącznika w kształcie stożka, aby dopasować optymalną długość do indywidualnych potrzeb – gładka konstrukcja drenu umożliwia docinanie jego długości w dowolnym miejscu (dren karbowany, w odróżnieniu od gładkiego, można docinać jedynie w odstępach skokowych co 5 – 6 cm)

Worek o pojemności 500 ml oraz 750 ml ma specjalną wielokomorową konstrukcję, dzięki czemu jest praktycznie niewidoczny pod ubraniem. Wielokomorowa budowa tłumi odgłosy przelewania się moczu w komorach worka oraz zapewnia równomierne rozmieszczenie moczu w jego wnętrzu – bez efektu balonowania

Aby zwiększyć komfort użytkowania, wewnętrzna strona worka jest wykonana z nietkanego, miękkiego i przyjaznego dla skóry materiału fizeleinowego, który chroni ją przed podrażnieniami i odparzeniami

Worki pakowane są pojedynczo w higieniczne, foliowe i łatwe do otworzenia opakowania



Worek jest przystosowany do noszenia na udzie lub łydce

Zawór odpływowy został zaprojektowany z myślą o łatwym, wygodnym i higienicznym opróżnianiu worka, nawet dla osób o niepełnej sprawności rąk. Dren wychodzący z worka może być bezpośrednio podłączony do worka do zbiórki nocnej bez potrzeby zdejmowania worka zamocowanego do nogi

Worek do zbiórki moczu powinien być zawsze trzymany poniżej poziomu, na którym znajdują się nerki. Podczas snu zaleca się zastosowanie worka do nocnej zbiórki moczu o większej pojemności. Worki na nogę **Larena** dostępne są w trzech wielkościach – 350 ml, 500 ml oraz 750 ml.

Worek Larena do zbiórki moczu, pojemność 1500 ml

Worek do zbiórki moczu **Larena** 1500 ml łączy cechy worka na nogę i do nocnej zbiórki moczu – przystosowany do noszenia na udzie lub tydzie i do zastosowań nocnych.

Worek posiada otwory na zamocowanie pasków mocujących do nogi oraz dodatkowe otwory do zawieszenia worka na ramie łóżka lub wózka inwalidzkiego za pomocą wieszaka. Otwory są dodatkowo wzmocnione, aby ułatwić pewne połączenie worka z paskami lub z wieszakiem


Zawór antyzwrotny zapobiega cofaniu się moczu, co jest bardzo ważne w profilaktyce infekcji


Wygodny i unikatowy zawór odpływowy T-tap o powiększonej powierzchni przesuwnej jest w prosty sposób obsługiwany przy użyciu jednej ręki

Skala nadrukowana na zewnątrz worka ułatwia odczyt ilości zebranego moczu

Worek może być przydatny również w sytuacjach, kiedy częste opróżnianie małego worka jest utrudnione.


Uniwersalny łącznik w kształcie stożka umożliwia proste podłączenie worka do cewnika wewnętrznego (urologicznego), zewnętrznego lub worka urostomijnego

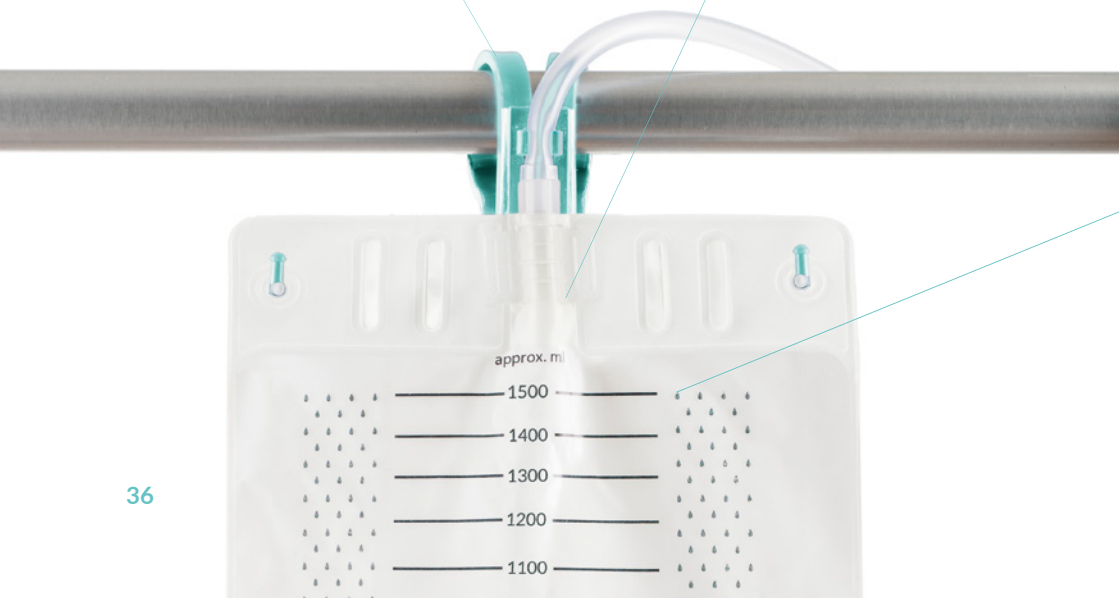

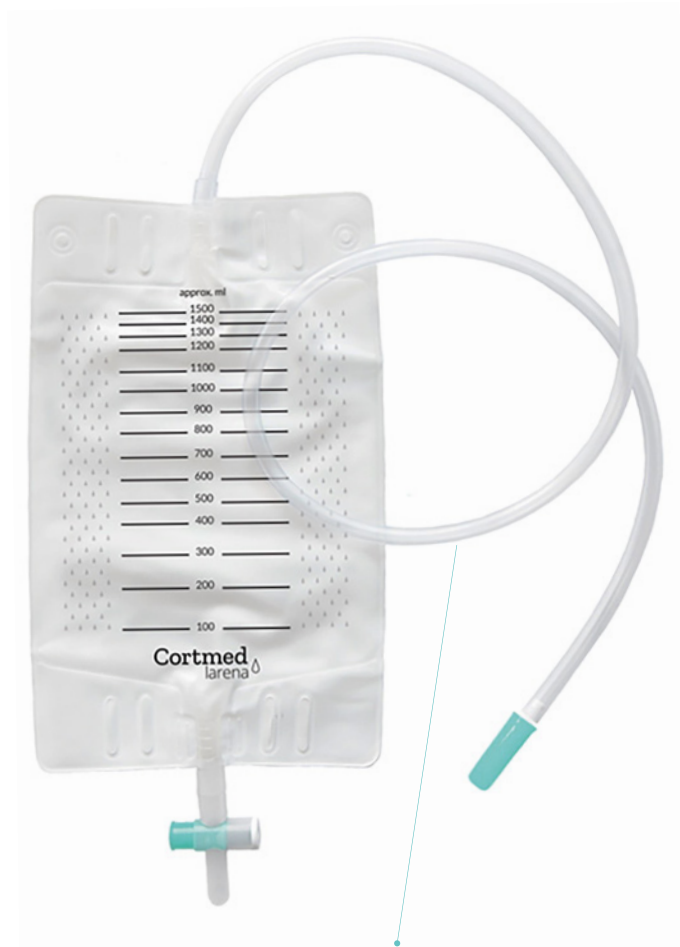

Miękki, elastyczny i gładki dren o długości 90 cm pozwala na pełną swobodę przy poruszaniu się oraz umiejscowienie worka poniżej poziomu pęcherza moczowego użytkownika. Przewód ułatwia odpływ moczu do worka, bez zalegania kropli moczu. Średnica oraz grubość drenu eliminuje możliwość powstawania niedrożności czy zagięcia, co zapewnia bezpieczeństwo i swobodę także podczas snu – bez ryzyka skręcenia drenu i zatkania odpływu moczu. Dren można dociąć przed założeniem łącznika w kształcie stożka, aby dopasować optymalną długość do indywidualnych potrzeb – gładka konstrukcja drenu umożliwia docinanie jego długości w dowolnym miejscu (dren karbowany, w odróżnieniu od gładkiego, można docinać jedynie w odstępach skokowych co 5 – 6 cm);

Aby zwiększyć komfort użytkowania, wewnętrzna strona worka jest wykonana z nietkanego i przyjaznego dla skóry, miękkiego materiału fizeelinowego, który chroni ją przed podrażnieniami i odparzeniami

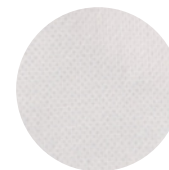

Worki pakowane są pojedynczo w higieniczne, foliowe i łatwe do otworzenia opakowanie



Worek Larena do dobowej zbiórki moczu (na noc) pojemność 2000 ml


Worek do dobowej zbiórki moczu (na noc) posiada: zawór antyzwrotny, zawór odpływowy T-tap, gładki dren o dużej średnicy oraz otwory na mocowanie wieszaka.

Zawór antyzwrotny zapobiega cofaniu się moczu, co jest bardzo ważne w profilaktyce infekcji

Skala nadrukowana na zewnątrz worka ułatwia odczyt ilości zebranego moczu

Duża pojemność worka zapewnia możliwość spokojnego snu w nocy, bez obawy o konieczność opróżniania worka

Wygodny i unikatowy zawór odpływowy T-tap o powiększonej powierzchni przesuwnej jest w prosty sposób obsługiwany przy użyciu jednej ręki

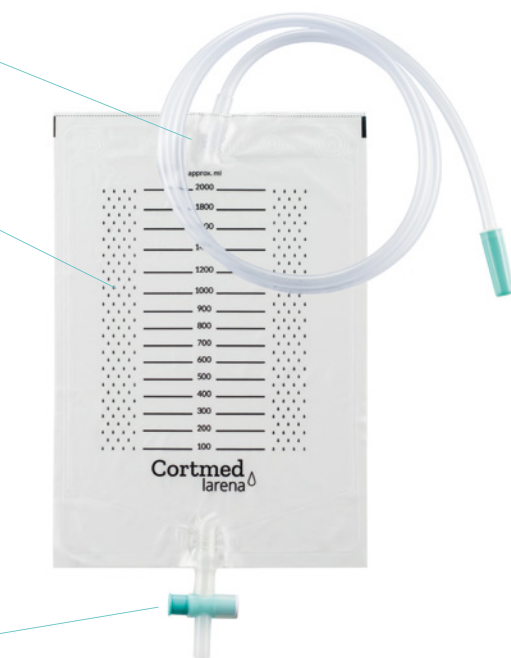

Podwójny zgrzew worka zapewnia użytkownikowi szczególne bezpieczeństwo

Miękki, elastyczny i gładki dren o długości 140 cm ułatwia odpływ moczu do worka, bez zalegania kropli moczu, co zapewnia bezpieczeństwo i swobodę podczas snu – bez ryzyka skręcenia drenu i zatkania odpływu lub zalegania moczu w drenie

Uniwersalny łącznik w kształcie stożka umożliwia proste podłączenie worka do cewnika wewnętrznego (urologicznego), zewnętrznego lub worka urostomijnego



Worki pakowane są pojedynczo w higieniczne, foliowe i łatwe do otworzenia opakowania

Worek **Larena** do dobowej zbiórki moczu można podłączyć do dowolnego worka na nogę – bez konieczności zdejmowania worka zamocowanego do nogi. W górnej części worka znajdują się otwory, umożliwiające przymocowanie wieszaka do worka. Otwory zostały dodatkowo wzmocnione, aby ułatwić pewne połączenie worka z wieszakiem. Założenie i obsługa wieszaka są wyjątkowo proste.




AKCESORIA MOCUJĄCE WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU

Larena paski mocujące worki do zbiórki moczu na nogę

W opakowaniu znajduje się komplet składający się z 2 sztuk pasków. Długość każdego paska to 60 cm. Paski mocujące wykonane są z miękkiego i elastycznego materiału oraz wyposażone są w guziki stabilizujące. Są one przystosowane do użytkowania także dla osób o zmniejszonej sprawności rąk.


W paskach **Larena** zastosowano najnowszą generację rzepy typu Velcro – nieniszczące ubrań, łatwe do zapięcia.

guziki stabilizujące

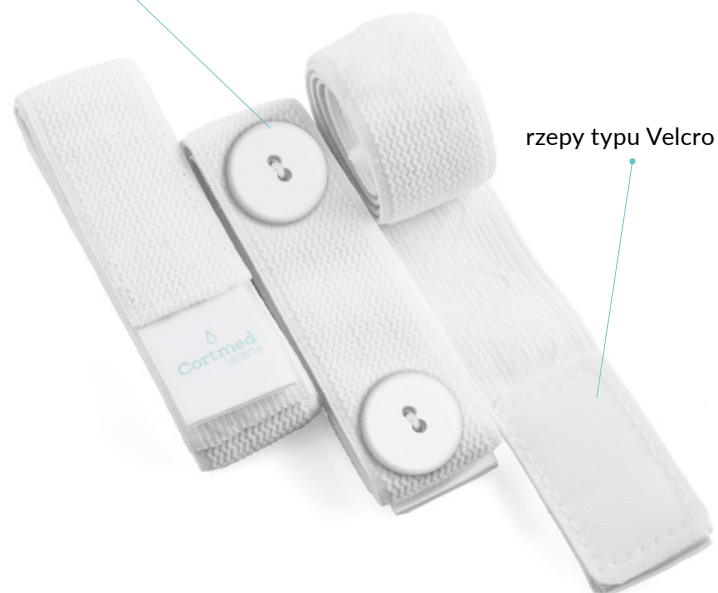

Dzięki podwójnej warstwie silikonu znajdującej się na wewnętrznej stronie pasków **Larena**, paski nie zsuwają się z nogi. Obecność antypoślizgowego silikonu jest cechą wszystkich dobrych pasków do mocowania. Powierzchnię antypoślizgową pasków **Larena** dodatkowo zwiększa „zygzakowy” sposób umieszczenia silikonu na pasku.

podwójna warstwa silikonu

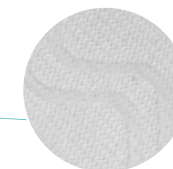

Guziki dodatkowo stabilizują mocowanie worka na nodze i zabezpieczają przed jego przemieszczaniem podczas chodzenia.

Worki **Larena** mają wzmocnione otwory na guziki stabilizujące (w górnej i dolnej części worka).

Przed zamocowaniem worka na nodze należy przyciąć paski mocujące na właściwą długość.



Pasek mocująco-ochronny Larena FixPocket do mocowania worków do zbiórki moczu na nogę

Pasek mocująco-ochronny **Larena FixPocket** to nadający się do prania wyrób medyczny wielokrotnego użytku przeznaczony dla osób z nietrzymaniem moczu, zapewniający bezpieczniejsze i wygodniejsze mocowanie worka do zbiórki moczu do ciała poprzez równomierne rozłożenie ciężaru wokół nogi i ograniczenie szeleszczenia worka podczas codziennego użytkowania.

Pasek mocująco-ochronny **Larena FixPocket** jest bezpieczną i wygodną alternatywą dla tradycyjnych pasków mocujących zapinanych na rzep. Podtrzymuje i osłania worek na nogę, oferując maksymalne wsparcie i komfort.

Dostępny jest w różnych rozmiarach, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie. Paski oznaczone są kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru.

Pasek dopasowuje się do kształtu nóg, zapewniając równomierne rozpraszanie moczu i redukcję hałasu. Dzięki uniwersalnej konstrukcji, pasek może być używany z dowolnym workiem na nogę o pojemności do 750 ml.

Jak założyć pasek mocująco-ochronny Larena FixPocket?



1.

2.

3.

Cechy produktu:

- zbudowany z delikatnego, miękkiego i elastycznego materiału;
- łatwy do zakładania;
- doskonale i pewnie mocuje worek na nodze;
- wycisza odgłos płynu;
- redukuje szeleszczenie worka
- odpowiedni do worków do zbiórki moczu o pojemności do 750 ml;
- można prać w temperaturze do 60°C;
- nie zawiera lateksu;



Taśma mocująca w rolce Aurega

Taśma mocująca w rolce Aurega to wyrób medyczny wykonany z cienkiej i przezroczystej folii poliuretanowej pokrytej warstwą samoprzylepną. Taśma jest przeznaczona do stosowania na skórze w celu przymocowania i zabezpieczenia opatrunków pierwotnych oraz innych wyrobów medycznych, np. przylepców stomijnych, worków do zbiórki moczu na nogę, cewników lub drenów.


Taśma stanowi oddychającą barierę ochronną na skórze, chroniąc ją przed wodą, płynami ustrojowymi oraz zewnętrznymi źródłami zakażenia.

Taśma jest rozciągliwa, elastyczna i łatwa w użyciu. Po naklejeniu na skórę idealnie dopasowuje się do kształtu ciała oraz podąża za jego ruchami, pozwalając na większy komfort i swobodę podczas codziennych aktywności fizycznych.

Taśmę można przycinać do dowolnego kształtu bądź rozmiaru. Dostępna jest w rolce o szerokości 5 cm i długości 10 m.



Instrukcja użycia taśmy mocującej w rolce Aurega

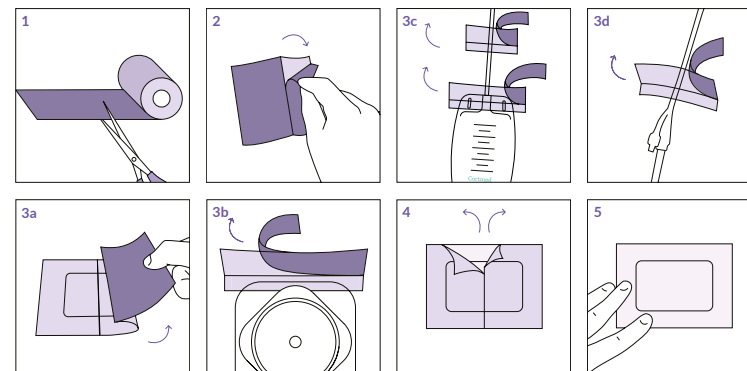

1. Odetnij odcinek taśmy o wymiarach odpowiadających rozmiarowi mocowanego wyrobu medycznego.
2. Zegnij odcięty odcinek taśmy, a następnie usuń wewnętrzną część
3. Odśloniętą część taśmy przyklej do ciała, pokrywając opatrunek (il. 3a), przylepiec stomijny (il. 3b), worek do zbiórki moczu na nogę (il. 3c) lub cewnik (il. 3d), a następnie wygładź. Powoli odklej drugą część wewnętrznego papieru ochronnego, przyklejając odślanianą część taśmy do ciała.
4. Usuń zewnętrzną część warstwy ochronnej.
5. Wygładź brzegi taśmy dociskając je lekko skóry.

PRODUKTY DO ZBIÓRKI MOCZU – INNE ZASTOSOWANIA

Worki do zbiórki moczu są refundowane również dla pacjentów z chorobami wymagającymi cewnikowania pęcherza moczowego, stosujących cewniki zewnętrzne oraz w przypadku urostomii.

Refundacja worków do zbiórki moczu przysługuje w ramach limitów ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia ubezpieczonym pacjentom:

- **z nefrostomią (kod zaopatrzenia P.098):** worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące;
- **z urostomią (kod zaopatrzenia P.099U):** worki urostomijne, worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu, akcesoria mocujące;
- **wymagającym cewnikowania pęcherza moczowego, z chorobami wymagającymi stosowania cewników zewnętrznych, oraz nadpęcherzowego odprowadzania moczu (kod zaopatrzenia P.097):** worki do zbiórki moczu na nogę, worki do nocnej zbiórki moczu.

Podłączenie worka **Larena**
do cewnika zewnętrznego



Podłączenie worka **Larena**
do cewnika wewnętrznego
typu Folleya



Podłączenie worka **Larena**
do cewnika wewnętrznego
typu Nelaton



Podłączenie worka **Larena**
do worka urostomijnego



O FIRMIE

Firma **Sturomedica** jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy **Cortmed International Ltd.** – irlandzkiego wytwórcy wyrobów medycznych z serii **Larena**.

Cortmed International zajmuje się wytwarzaniem oraz rozwojem wyrobów medycznych przeznaczonych dla pacjentów stomijnych i urologicznych. Produkty projektowane są w oparciu o doświadczenia pacjentów i pracowników służby zdrowia z całego świata. Bliska współpraca z użytkownikami produktów **Cortmed International** pozwala na zagwarantowanie maksymalnej satysfakcji z dopasowanej do potrzeb oferty produktowej. Przy wytwarzaniu produktów, największa uwaga przykładana jest do zapewnienia jak najwyższej jakości używanych materiałów i kontroli procesu produkcji. Produkty **Cortmed International** są stale oceniane i ulepszone stosownie do obserwacji pracowników i informacji zwrotnych uzyskanych od pacjentów z całego świata.

Firma **Sturomedica** oferuje w sprzedaży bezpośredniej oraz w sprzedaży wysyłkowej:

- Wyroby urologiczne oraz sprzęt do zbiórki moczu **Larena**;
- Produkty do zaopatrzenia nefrostomii i urostomii;
- Produkty do zaopatrzenia stomii **Cortmed International** oraz innych firm;
- Pieluchomajtki i wkładki anatomiczne;
- Środki pielęgnacyjne;
- Pasy brzuszne i przeciwprzepuklinowe;
- Inne wyroby medyczne.

Oferujemy pomoc oraz dostawę refundowanych produktów drogą wysyłkową do miejsca zamieszkania – w ramach refundacji NFZ bez dodatkowych kosztów przesyłki.

Oferujemy edukacyjne próbki produktów do zbiórki moczu oraz sprzętu stomijnego. W celu otrzymania edukacyjnych próbek produktów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem stron internetowych:

www.nefrostomia.pl
www.sturomedica.pl

Na Państwa telefony czekają pielęgniarki i wykwalifikowany personel:

+48 530 612 783
+22 468 13 94



ASORTYMENT PRODUKTÓW DO ZBIÓRKI MOCZU

Worki do zbiórki moczu mocowane na nogę

Nazwa i pojemność	Kod produktu	Refundacja
Worek Larena Leg Bag, 350ml	15110110	P.097, P.098, P.099.U
Worek Larena Leg Bag, 500ml	25110130	P.097, P.098, P.099.U
Worek Larena Leg Bag, 750ml	35110130	P.097, P.098, P.099.U



Worek do zbiórki moczu

Nazwa i pojemność	Kod produktu	Refundacja
Worek Larena Leg Bag, 1500ml	47411110	P.097, P.098, P.099.U



Worek do zbiórki moczu na noc

Nazwa i pojemność	Kod produktu	Refundacja
Worek Larena Night Bag, 2000ml	59401010	P.097, P.098, P.099.U



Paski mocujące na nogę

Nazwa i pojemność	Kod produktu	Refundacja
Paski mocujące na nogę Larena (2 szt.)	10602015	P.098, P.099.U



Pasek mocująco-ochronny

Nazwa i pojemność	Kod produktu	Refundacja
Larena FixPocket, r. S (28-43 cm)	LBHS	P.098, P.099.U
Larena FixPocket, r. M (43-63 cm)	LBHM	P.098, P.099.U
Larena FixPocket, r. L (53-78 cm)	LBHL	P.098, P.099.U
Larena FixPocket, r. XL (63-89 cm)	LBHXL	P.098, P.099.U



Taśma mocująca w rolce

Nazwa i pojemność	Kod produktu	Refundacja
Taśma mocująca w rolce Aurega, 5 cm x 10 m	FTR05	P.098, P.099.U



WYKAZ WYBRANYCH REFUNDOWANYCH PRODUKTÓW UROLOGICZNYCH

Lp*	Nazwa wyrobu medycznego	Limit	Odpłatność	Kryteria przyznawania	Okres
P.97	Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk	6,5 zł/szt.	0%	choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych, nadpęcherzowe odprowadzenie moczu (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny)	raz na miesiąc
P.98	Worki do zbiórki moczu do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny	120 zł	0%	nefrostomia (z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk)	raz na miesiąc
P.99.U	Inny sprzęt urostomijny	480 zł	0%	stomia na układzie moczowym (urostomia)	raz na miesiąc

*Liczba porządkowa wyrobu medycznego (dawniej: „kod zaopatrzenia”)

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2019 poz. 1267)

Stan prawny: 10.2021 r.

NOTATKI

Cortmed

International

Sturomedica,
wyłączny przedstawiciel
Cortmed International w Polsce

ul. Kasztanowa 17, 05-830 Nadarzyn
sturomedica@sturomedica.pl
www.sturomedica.pl

